


Istruzioni per il test a casa

Basta raccogliere due piccoli campioni di feci e spedirli per posta


Importante

- Fai il test entro 2 settimane dalla ricezione.
- Inserisci il modulo nella busta di ritorno insieme ai campioni.

Il kit contiene tutto il
necessario per fare il test

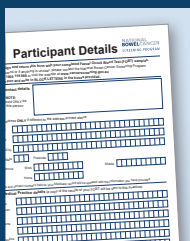


1 x modulo del
partecipante

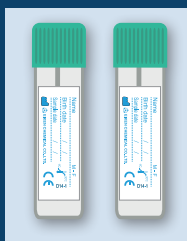

2 x provette di
raccolta



2 x fodere
per il WC

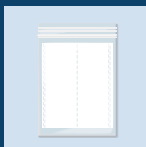

1 x sacchetto
con chiusura
a zip



1 busta pre-
affrancata

! Prima di fare il test

- ✓ Posiziona il test vicino al WC, per ricordarti di farlo.
- ✓ Imposta un promemoria per i giorni in cui vuoi prelevare i campioni.
- ✓ Controlla la data di scadenza sul retro del kit. Se il kit è scaduto, chiama il numero 1800 627 701 e richiedine un altro.
- ✓ Continua a prendere i farmaci che stai assumendo e mangia normalmente.

Non fare il test se hai:

- ✗ Delle emorroidi che sanguinano. In questo caso, rivolgiti al tuo medico.
- ✗ Sangue nell'urina o sangue nella tazza del gabinetto. In questo caso, rivolgiti al tuo medico.
- ✗ Il ciclo mestruale. Aspetta 3 giorni dalla fine del ciclo prima di fare il test.
- ✗ Fatto una colonscopia di recente.

✉ Risultati

I risultati saranno inviati a te e al tuo medico entro 4 settimane dalla spedizione dei campioni.

Un risultato **negativo** significa che non è stato rilevato del sangue nei campioni. Dovresti ripetere il test dopo 2 anni.


Un risultato **positivo** significa che è stato rilevato del sangue nei campioni. Ciò non significa che hai il cancro all'intestino. Ci sono molte ragioni per cui si può avere del sangue nelle feci, e la maggior parte non è legata al cancro. Rivolgiti al tuo medico il prima possibile per discutere dei risultati.

Guarda il video con le istruzioni del test:
www.health.gov.au/nbcsp



Istruzioni

1 Preparazione

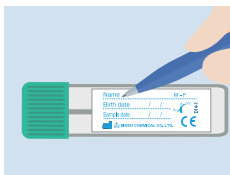

Scrivi il tuo nome, la data di nascita e la data di effettuazione del test sulle provette.




Fai la pipì e **tira l'acqua** del gabinetto.

Riponi la fodera dentro il **gabinetto** con la scritta rivolta verso l'alto. Non è un problema se si bagna.

2 Raccolta



EsPELLI le feci sulla fodera.

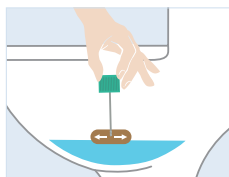

Ruota il **tappo della provetta** per aprirla. Striscia la punta del bastoncino sulle feci; ne basta una piccola quantità.

Riponi il bastoncino nel tubo e chiudilo con un clic. **Tira lo sciacquone** per gettare la fodera biodegradabile.



Inserisci la **provetta** nella busta con chiusura a zip.

Metti la busta in un luogo fresco, ad esempio in frigorifero, ma non nel freezer.

3 Ripetere




Ripeti il **1° e il 2° passo** usando la seconda provetta, la prossima volta che ti devi scaricare. Sarebbe ideale raccogliere i due campioni a distanza di 3 giorni l'uno dall'altro.

Vai al 4° passo.

4 Spedizione

Spedisci i campioni il prima possibile.

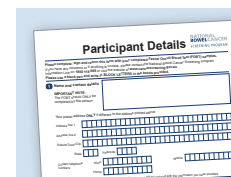

Compila il modulo del **partecipante** con i tuoi dati. Scrivi le date della raccolta dei campioni e firma il modulo.



Sulla busta firma la parte frontale e scrivi il tuo nome e indirizzo sul retro.

Inserisci i campioni e il modulo nella busta.



Spedisci la busta. I campioni devono restare al fresco il più a lungo possibile. Metti la busta in una cassetta postale nelle ore più fresche della giornata o portala in un ufficio postale.

? Domande

Linea di assistenza per il kit del test
1800 930 998

National Cancer Screening Register
1800 627 701

Visita il nostro sito web
www.health.gov.au/nbcsp



Traduzioni

Per maggiori informazioni nella tua lingua
www.health.gov.au/nbcsp-translations

Servizi linguistici e di traduzione
13 14 50

PATHOLOGY SERVICES



SPONSOR



MANUFACTURER

