


घरायसी परीक्षण किट प्रयोग गर्ने निर्देशनहरू

दुईवटा साना नमूनाहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई हुलाकबाट पठाउनुहोस् अनि तपाईंको काम पूरा भयो।


महत्वपूर्ण जानकारी

- यस परीक्षणलाई अर्को २ हप्ताभित्र पूरा गर्नुहोस्।
- तपाईंले आफ्नो नमूनाहरू फर्काउँदा खाममा आफ्नो फारम समावेश गर्नुहोस्।

तपाईंको किटमा परीक्षण गर्न चाहिने आवश्यक सबै कुरा छन्

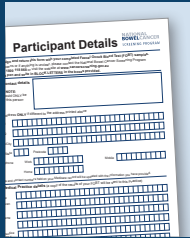

१ सहभागी
विवरण फारम

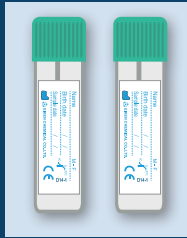

२ सङ्कलन ट्यूबहरू



२ ट्वाइलेट
लाइनरहरू



१ जिपलक
झोला



१ हुलाक शुल्क
तिरिसकेको एक
खाम

! तपाईंले परीक्षण गर्नुअघि

- ✓ शौचालयको छेउमा परीक्षणलाई राख्नुहोस् जहाँ तपाईंले परीक्षण गर्न सम्झनुहुनेछ।
- ✓ तपाईंले आफ्नो नमूना लिने दिनको लागि रिमाइन्डर सेट गर्नुहोस्।
- ✓ किट को पछाडिको म्याद समाप्त हुने मिति जाँच गर्नुहोस्। यदि किटको म्याद सकिएको छ भने, प्रतिस्थापनको लागि १८०० ६२७ ७०१ मा फोन गर्नुहोस्।
- ✓ तपाईंले खाइरहेका औषधि तथा खानाहरू सधैं झै खानुहोस्।

यदि तपाईंलाई यस्तो भएको छ भने परीक्षण नगर्नुहोस्:

- ✗ पाइल्स (हेमोरोइड्स) जसबाट रगत बग्छ। यदि यस्तो हुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
- ✗ तपाईंको पिसाबमा रगत वा शौचालयको बाउलमा रगत देखियो। यदि यस्तो हुन्छ भने, आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नुहोस्।
- ✗ तपाईंको महिनावारीको भएको छ। तपाईंको महिनावारी समाप्त भएको ३ दिनपछि परीक्षण गर्नुहोस्।
- ✗ भर्खर कोलोनोस्कोपी भएको थियो।

✉ तपाईंको परीक्षणको नतिजा

तपाईंले आफ्नो नमूनाहरू हुलाकबाट पठाएपछि ४ हप्ताभित्र तपाईंको नतिजा तपाईं र तपाईंको डाक्टरलाई पठाइनेछ।


नकारात्मक नतिजाको मतलब कुनै रगत फेला परेन। तपाईंले २ वर्षमा फेरि परीक्षण गर्नुपर्छ।

सकारात्मक नतिजाको मतलब रगत भेटियो। यसको मतलब सधैं तपाईंलाई आन्द्राको क्यान्सर छ भन्ने होइन। धेरै कारणहरू हुन्छन् जसले तपाईंको दिसामा रगत हुन सक्छ, र धेरैजसो क्यान्सरसँग सम्बन्धित छैनन्। थप जानकारी पाउनको लागि सकेसम्म चाँडो आफ्नो डाक्टरलाई भेट्नको लागि समय मिलाउनुहोस्।

परीक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारे यो भिडियो हेर्नुहोस्:
www.health.gov.au/nbcsp



१ तयार गर्नुहोस्

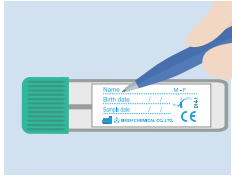

आफ्नो नाम, जन्ममिति र तपाईंले परीक्षण गर्ने मितिलाई कुनै एक ट्यूबमा लेख्नुहोस्




पिसाब फेर्नुहोस् र शौचालय प्लश गर्नुहोस्।

ट्वाइलेटमा एउटा ट्वाइलेट लाइनर राख्नुहोस् लेखेकोलाई माथिपट्टि पारेर। यदि यो भिज्यो भने पनि ठीकै छ।

२ सङ्कलन गर्नुहोस्



लाइनरमा पर्नेगरी दिसा गर्नुहोस्

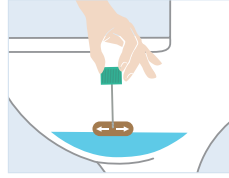

ट्यूबलाई घुमाएर खोल्नुहोस्। स्टिकको टुप्पोलाई दिसाबाट तान्नुहोस्। तपाईंको नमूना सानो हुनु आवश्यक छ।

स्टिकलाई फेरि ट्यूबमा राख्नुहोस् र यसलाई क्लिक गरेर बन्द गर्नुहोस्। बायोडिग्रेडेबल लाइनरलाई शौचालयमा प्लश गर्नुहोस्।

३ दोहोर्याउनुहोस्



जब तपाईं अर्को पटक दिसा गर्नुहुन्छ भने अर्को ट्यूब प्रयोग गरेर चरण १ र २ दोहोर्याउनुहोस्। एक अर्काको ३ दिनभित्र दुवै नमूनाहरू संकलन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।

त्यसपछि चरण ४ मा जानुहोस्।

४ नमूना पठाउनुहोस्

तपाईंको नमूनाहरू सकेसम्म चाँडो हुलाकबाट पठाउनुहोस्।

? प्रश्नहरू भएमा

परीक्षण किट हेल्पलाइन: १८०० ९३० ९९८

राष्ट्रिय क्यान्सर स्क्रीनिंग रजिस्टर:
१८०० ६२७ ७०१


हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्:
www.health.gov.au/nbcsp



अनुवाद


तपाईंको भाषामा जानकारी पाउनको लागि
www.health.gov.au/nbcsp-translations

भाषा र अनुवाद सेवाहरू: १३ १४ ५०

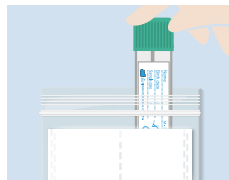


ट्यूबलाई जिपलक झोलामा राख्नुहोस्।

झोलालाई कतै चिसो ठाउँमा राख्नुहोस्, जस्तै फ्रिजमा। जम्न नदिनुहोस्।

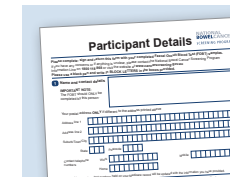

सहभागी विवरण फाराम भर्नुहोस्। तपाईंको नमूनाहरू लिएको मितिहरू लेख्नुहोस् र फाराममा हस्ताक्षर गर्नुहोस्।

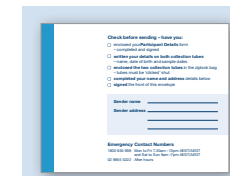

खाममा, अगाडि हस्ताक्षर गर्नुहोस् र पछाडि आफ्नो नाम र ठेगाना लेख्नुहोस्।

फाराम र नमूनाहरूलाई खाममा राख्नुहोस्।



खाम हुलाकबाट पठाउनुहोस्। नमूनाहरू सकेसम्म लामो समयसम्म चिसो रहनु पर्छ। यसलाई दिनको चिसो समयमा हुलाक बाकस (मेलबक्स) मा खसाल्नुहोस् वा यसलाई हुलाक कार्यालयमा लैजानुहोस्।