

Bản Hướng Dẫn




Bước 1

Quý vị sẽ nhận được một bao thư qua bưu điện với mọi thứ cần thiết để xét nghiệm, gồm cả bản hướng dẫn. Tất cả điều cần làm là lấy 2 mẫu nhỏ từ 2 mẫu phân riêng rẽ.




Bước 2

Lấy ống nghiệm ra và ghi chi tiết của quý vị. Trước tiên đi tiểu, rồi lót bàn cầu bằng giấy có thể xả được vào bồn cầu. Quý vị lấy phân của mình để làm mẫu xét nghiệm.

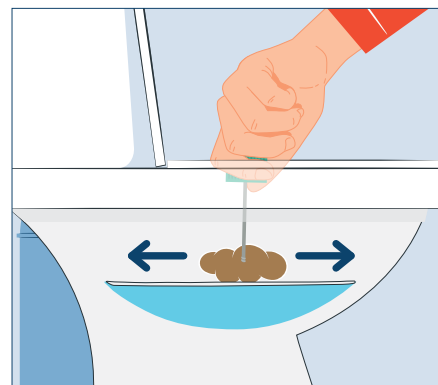

Bước 3

Sau khi đi tiêu xong, mở ống nghiệm và quẹt đầu que qua lại trên phân. Quý vị chỉ cần lấy mẫu nhỏ. Bỏ que trở lại ống và đóng nắp.

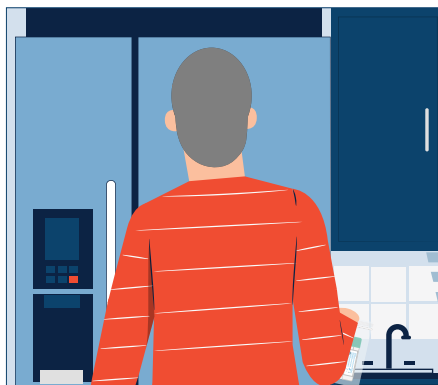


Bước 4

Bỏ ống nghiệm vào túi có dây kéo (ziplock bag) và giữ nơi thoáng mát. Tủ lạnh là thích hợp nhất, nhưng đừng để ngăn đá.



Bước 5

Khi đi tiêu tiếp tục, cũng làm lại như vậy, cho phân vào ống nghiệm thứ nhì.

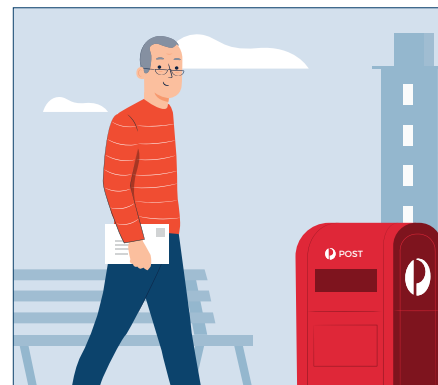

Bước 6

Điền vào tờ mẫu và cho vô bao thư 2 mẫu phân. Xem bản kiểm tra (checklist) ở phía sau bao thư trước khi dán lại. Gửi mẫu phân qua bưu điện trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu được. Miễn cước phí bưu điện!